

## POSTUP PŘI ODBĚRU KRVE NA TEST NIPT


S pacientkou, která má o toto vyšetření zájem, je nutné vyplnit žádanku a vyplnit a podepsat informovaný souhlas s genetickými testy. Jeden výtisk informovaného souhlasu dostane pacientka a druhý se odešle společně se vzorky do firmy Genetika Plzeň. Pacientka musí být informována o typu testu, způsobu jeho vyhodnocení a jeho omezeních.

### ODBĚR KRVE

Odběr krve se provádí do 2 zkumavek Streck cell – free DNA BCT (10ml), které jsou součástí odběrového setu NIPT.

Na zkumavku napište jméno pacientky, číslo pojištěnce a datum odběru.

Po odběru krve je nutné zkumavku 10x obrátit o 180° (viz.obrázek) a skladovat ji při pokojové teplotě.

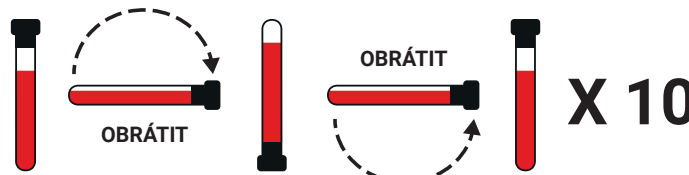

### TRANSPORT



Během transportu udržujte teplotu 10 – 25 °C. Ke každému vzorku přiložte originál podepsaného informovaného souhlasu a vyplněnou žádanku. Zkumavku s krví je vhodné odeslat v den odběru. Krev musí být zpracována v laboratoři Genetika Plzeň nejpozději do 45 hodin po odběru. Doporučujeme odběr provádět v dopoledních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek.

### OBJEDNÁNÍ TRANSPORTU



Dopravu objednávejte nejlépe den před odběrem. Při objednání přepravy zdůrazněte, že se jedná o neinfekční biologický materiál.



Adresa:  
Genetika Plzeň, s.r.o.  
Parková 1254/11a, 326 00 Plzeň – Černice  
Telefon: +420 377 241 529



Kontaktní osoba:  
Bc. Lacyková Hana  
Telefon: +420 731 433 568

### VÝSLEDEK



Výsledek testu bude zaslán na uvedenou adresu na žádance nejpozději do 3 týdnů od přijetí vzorku laboratoří a po zaplacení testu.

### MÁTE DOTAZ?



V případě jakýchkoliv dotazů a objednání nových odběrových kitů nás můžete kontaktovat:  
recepce@genetika-plzen.cz | Bc. Hana Lacyková, tel.: +420 731 433 568